



MOPEDIA®

MA RP700x_RP701x_RP703_RP710_RP713 02 A_05-2016

**STAMPELLE
MANUALE D'ISTRUZIONE**

**CRUTCHES
INSTRUCTION MANUAL**

INDICE

1. CODICI.....	Pag.3
2. INTRODUZIONE.....	Pag.3
3. DESTINAZIONE D'USO	Pag.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	Pag.3
5. AVVERTENZE GENERALI.....	Pag.4
6. DESCRIZIONE GENERALE	Pag.4
6.1 Stampelle ascellari.....	Pag.4
6.2 Stampelle avambraccio	Pag.4
6.3 Regolazione altezza	Pag.4
7. PRIMA DI OGNI USO.....	Pag.4
8. AVVERTENZE PER L'UTILIZZO.....	Pag.5
9. MODALITÀ D'USO.....	Pag.5
10. MANUTENZIONE.....	Pag.5
11. PULIZIA E DISINFEZIONE.....	Pag.5
11.1 Pulizia.....	Pag.5
11.2 Disinfezione.....	Pag.5
12. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	Pag.6
12.1 Condizioni di smaltimento generali.....	Pag.6
13. CARATTERISTICHE TECNICHE	Pag.6
13.1 Parti di ricambio	Pag.6
14. GARANZIA	Pag.7
14.1 Riparazioni.....	Pag.7
14.2 Ricambi.....	Pag.7
14.3 Clausole esonerative	Pag.7

Dispositivo Medico di Classe I

D.Lgs 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

1. Codici

RP710	Stampelle sottoascellari - Adulti
RP713	Stampelle sottoascellari - Ragazzi
RP700B	Stampelle avambraccio - Bambini
RP700G	Stampelle avambraccio - Bambini
RP700R	Stampelle avambraccio - Bambini
RP701A	Stampelle avambraccio - Adulti
RP701B	Stampelle avambraccio - Adulti
RP701R	Stampelle avambraccio - Adulti
RP701V	Stampelle avambraccio - Adulti
RP703	Stampelle avambraccio - Piegevole
RP705A	Stampelle avambraccio - Con ammortizzatore
RP706N	Stampelle avambraccio - Con appoggio morbido

2. Introduzione

Grazie per aver scelto un ausilio della linea **MOPEDIA** by Moretti. Le stampelle **MOPEDIA** by Moretti sono state progettate e realizzate per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il dispositivo. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. Destinazione d'uso

Le stampelle **MOPEDIA** by Moretti sono ausili maneggiati da un braccio adatte a sostenere e/o aiutare la mobilità di persone con difficoltà di deambulazione.



- È vietato l'utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel presente manuale
- Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
- Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

4. Dichiarazione di conformità CE

Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I della direttiva 93/42/CEE come prescritto dall'allegato VII della suddetta direttiva.
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I
6. **NON È CONSENTITO** utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della destinazione d'uso prevista dalla Moretti S.p.A.
7. Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche

5. Avvertenze generali

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale
- Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da fonti di calore
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

6. Descrizione generale

6.1 Stampelle sottoascellari

Realizzate in alluminio anodizzato leggero. L'ascellare e l'impugnatura hanno una forma anatomica antiscivolo e sono costruite in materiale resistente per offrire comfort e sicurezza. Dotate di puntali antiscivolo e regolabili in altezza ogni 2.5cm.

RP710 Da 112.5 a 140cm

RP713 Da 93 a 114 cm

6.2 Stampelle avambraccio

Realizzate in alluminio anodizzato con impugnatura anatomica antiscivolo stampata ad iniezione in un unico pezzo per offrire comfort e sicurezza. Dotate di anello antirumore sull'asta scorrevole, catarifrangente sull'impugnatura, puntali antiscivolo e regolabili in altezza ogni 2.5cm.

RP703 Pieghevole per ridurre l'ingombro e facilitarne il trasporto

RP705A Completo di ammortizzatore per attutire l'impatto al suolo

RP706N Con impugnatura anatomica e morbida per un maggior comfort

RP700x Da 65 a 81 cm

RP70x Da 74 a 97 cm

RP703 Da 76 a 97 cm

6.3 Regolazione altezza

È necessario regolare le stampelle in base alla propria altezza. La misura si prende con le scarpe indossate.

MODELLO ASCELLARE

Posizione eretta con i palmi delle mani appoggiati sulle impugnature. Una volta trovata l'altezza corretta, la stampella dovrebbe arrivare tra 1 e 2 cm sotto le ascelle. Le impugnature devono essere in linea con la testa del femore. Per aggiustare l'altezza delle impugnature, svitare e sfilare la vite. Inserire la vite nel foro desiderato e stringere bene.

MODELLO AVAMBRACCIO

Premere il fermo e sfilare la canna portandola in corrispondenza dei fori in base all'altezza desiderata e alla manovrabilità soggettiva del paziente stesso. Regolare la stampella in modo che l'altezza dell'impugnatura corrisponda all'altezza della testa del femore. Riposizionare il fermo sul foro per bloccare la canna e assicurarsi che il fermo sia penetrato completamente nel foro.

Nota: Una volta regolate correttamente le stampelle, le braccia si devono trovare piegate comodamente mentre si sta in posizione eretta.

7. Prima di ogni uso

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
- Verificare il corretto inserimento del pulsante nel foro nonché l'assemblaggio del dispositivo

8. Avvertenze per l'utilizzo

- Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose
- Non superare il peso massimo paziente riportato sull'etichetta prodotto e nel capitolo caratteristiche tecniche del presente manuale
- Evitare di lasciare il dispositivo all'esterno e a contatto con l'acqua per un periodo di tempo prolungato
- Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto nonché lo stato dei puntali in gomma. Sostituirli una volta usurati
- In caso di dubbi sull'utilizzo, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore
- Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini

9. Modalità d'uso

Impugnare le stampelle, portarle avanti e far avanzare l'arto infortunato facendo ricadere il peso sulle impugnature delle stampelle, far oscillare il corpo in avanti e tenere il piede sano ben appoggiato a terra, infine portare in avanti il piede sano. Le stampelle non devono mai trovarsi posteriormente al paziente.

SALIRE LE SCALE

- Appoggiare sul gradino la gamba sana
- Appoggiare poi le stampelle ed infine la gamba malata

SCENDERE LE SCALE

- Appoggiare sul gradino inferiore le stampelle
- Scendere con la gamba malata
- Infine appoggiare la gamba sana

10. Manutenzione

I dispositivi della linea **MOPEDIA** by Moretti al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno ogni 2 anni, l'idoneità all'uso del vostro prodotto. In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

11. Pulizia e disinfezione

11.1 Pulizia

Utilizzare esclusivamente un panno umido per rimuovere la polvere, con del sapone neutro per rimuovere lo sporco più difficile. Asciugare bene prima dell'utilizzo.

11.2 Disinfezione

Se è necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante.

N.B. Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente

12. Condizioni di smaltimento

12.1 Condizioni di smaltimento generali



In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

13. Caratteristiche tecniche

Codici	Colore	Materiale	Regol. altezza	portata massima
RP700B	BLU	Alluminio anodizzato	65-81 cm	80 kg
RP700G	GIALLO	Alluminio anodizzato	65-81 cm	80 kg
RP700R	ROSSO	Alluminio anodizzato	65-81 cm	80 kg
RP710		Alluminio anodizzato	112.5 - 140 cm	130 kg
RP713		Alluminio anodizzato	93 - 114 cm	130 kg
RP701A	ARGENTO	Alluminio anodizzato	74 - 97 cm	100 kg
RP701B	BLU	Alluminio anodizzato	74 - 97 cm	100 kg
RP701N	NERO	Alluminio anodizzato	74 - 97 cm	100 kg
RP701R	ROSSO	Alluminio anodizzato	74 - 97 cm	100 kg
RP701V	VERDE	Alluminio anodizzato	74 - 97 cm	100 kg
RP703		Alluminio anodizzato	76 - 97 cm	100 kg
RP705A	NERO	Alluminio anodizzato	74 - 97 cm	100 kg
RP706N	NERO	Alluminio anodizzato	74 - 97 cm	100 kg

13.1 Parti di ricambio

RV7010 Puntali per stampella avambraccio grigi 2 pz

RV7011 Puntali per stampella avambraccio neri 2 pz

RV7020 Puntali per stampella sottoascella 2 pz

RV7050 Sottoascella in spugna per RP71x 2 pz.

RV7040 Manopola in spugna ricambio per RP71x 2pz

14. Garanzia

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

14.1 Riparazioni

Riparazione in garanzia Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.

Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

14.2 Ricambi

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

14.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.



CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto _____

Acquistato in data _____

Rivenditore _____

Via _____ **Località** _____

Venduto a _____

Via _____ **Località** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C



Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com